

ПРЕПАРАТЫ INSTITUTE HYALUAL В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА



HYALUAL
— SCIENCE & RESULTS —



www.hyalual.ua

Два доктора, которые активно используют в своей работе препараты Institute Hyalual (Швейцария), делятся своими алгоритмами работы и практическими кейсами



Инга ВОЛОШИНА-АНДРАШКО,
дерматовенеролог,
косметолог, директор
клиник «Асклепий»,
«Эстимед» (Ужгород),
совладелец клиники
Dermarevolta
(Братислава,
Словакия) (Украина)

Пациентка обратилась с жалобами на усталый вид и запросом натуральной коррекции.

Объективно: «усталый» морфотип старения, овальное лицо, долихоцефалический тип строения черепа. Асимметрия относительно центральной оптической оси лица и возрастные инволютивные изменения: депрессии средней трети и височной зоны, носослезная и щечноскуловая борозды, лабиоментальная складка, губоподбородочные морщины, деформация нижней трети («брылы»), седловидная деформация носа.

КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

St. Localis: в области щеки и крыльев носа отмечены единичные телеангиэктазии, кожа сухая, со сниженным тургором, мимические морщины умеренно выраженные.

Для пациентки был разработан план терапии.

В январе 2018 года неодимовым лазером DEKA (Италия) провели коагуляцию сосудов. Потребовалась двукратная процедура селективного склерозирования с использованием частоты лазера 1 064 нм с интервалом 1 месяц.

Для улучшения состояния наружных покровов провели три процедуры редермализации препаратом XELA Rederm 1,1%, 2 мл, от Institute Hyalual с интервалом три недели.

Для коррекции периорбитальной зоны – «гусиных лапок» – провели бо-

тулинотерапию препаратом Botox (Allergan), 20 ЕД.

Инъекционная коррекция проводилась в два этапа.

В ноябре 2018 года приступили к коррекции лица пациентки гиалуроновыми филлерами.

Филлер Alexa Volume 20 мг/мл (Institute Hyalual) ввели ретроградно супрапериостально, 3–4 точки доступа в болюсной технике, в объеме 0,5 мл с каждой стороны, до достижения визуальной элевации тканей.

Носо-слезную борозду корректировали филлером Alexa Smooth 15 мг/мл. Вводили по 0,5 мл на сторону в канюльной технике (канюля TSK 22 G, 50 мм) под круговую мышцу глаза.

В височной области использовали препарат Alexa Volume. Канюльная техника, глубина введения – между поверхностным и глубоким слоем височной фасции. Точка входа – нижняя 1/3 Linea Temporalis лобной кости.

У пациентки наблюдалась седловидная деформация носа, связанная с детской травмой. После отрицательной пробы Коттла (тест на коллабирование внутреннего носового клапана) принято решение провести контурную пластику наружного носа филлером Alexa Volume 20 мг/мл в объеме 0,7 мл канюлей 22 G (50 мм).

Фото 1



Фото 2





Учитывая отсутствие лидокаина в препарате и особенности кровоснабжения этой зоны, а также использование канюли, мы получаем более высокую гарантию безопасности и контроля гипотетической ишемизации или тромбоза угловой артерии, артерии спинки носа и других мелких сосудов этой сложной анатомической зоны.

Для коррекции губ использовали препарат Alexa Medium 17,5 мг/мл объемом 0,8 мл с целью «реставрации губ»

в веерной технике с использованием 4 вертикальных и 4 горизонтальных вееров для полного покрытия зоны. Перед процедурой нанесли топический анестетик Anesthetic Pro Formula от Institute Hyalual.

Подбородок корректировали супрапериостальным болюсным введением перпендикулярно к коже 0,5 мл Alexa Volume 20 мг/мл иглой для улучшения проекции подбородка по линии Риккетса.

Для коррекции «морщин марионетки» канюлей 25 G (50 мм) ввели препарат Alexa Volume 20 мг/мл в объеме 0,5 мл на сторону. Точка доступа – по краю нижней челюсти, препарат оставили на субдермальном уровне в проекции угла рта. В таких случаях возможно дополнительное супрапериостальное болюсное введение по краю нижней челюсти.

Общий объем ГК – 6 мл, схема введения показана на **фото 1**. Результат терапии показан на **фото 2**.



*Александр
КАРПИНСКИЙ,
врач-отоларинголог,
пластический хирург,
специалист
по инъекционной
косметологии
(Украина)*

После обязательного сбора анамнеза, осмотра области губ и носогубного треугольника, осмотра полости рта пациента и оформления добровольного информированного согласия нужно сфотографировать пациента анфас, полупрофиль и профиль. После процедуры его нужно сфотографировать повторно и через 14 дней на контрольном осмотре.

После демакияжа и очищения зоны коррекции обрабатываем кожу носогубного треугольника 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата или 0,02% раствором декасана для наружного применения.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ГУБ

Наносим на 15 минут местное анестезирующее средство Anesthetic Pro Formula.

Перед введением гиалуронового наполнителя снимаем анестезирующее средство и повторно обрабатываем кожу 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата или 0,02% раствором декасана для наружного применения. После этого можно начинать проводить коррекцию препаратом Alexa Volume 20 мг/мл.

В зависимости от физиологии пациента и его пожеланий выбираем технику коррекции: линейно-ретроградую, веерную, болюсную или микроболюсную. Моделирование введенного препарата выполняем легкими массажными движениями, после завершения коррекции проверяем, нет ли уплотнений. Количество необходимого для процедуры препарата определяется

индивидуально, в целом в область губ можно ввести до 2 мл за одну сессию.

Завершаем процедуру антисептической обработкой зоны манипуляций. Даем рекомендации.

Результаты контурной пластики губ у разных пациентов с использованием филлера Alexa Volume 20 мг/мл показаны на **фото 3**.

Фото 3

