


■ КОНТУРИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГУБ. ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ

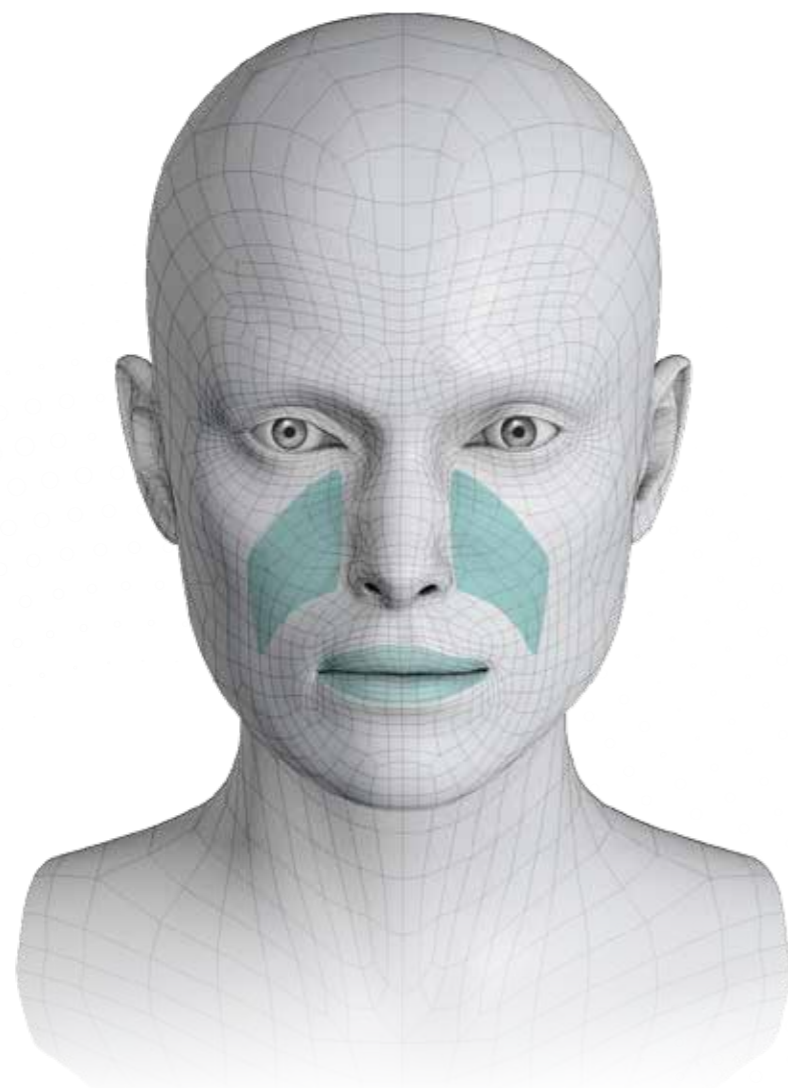

ALEXA MEDIUM¹

- Носослезная борозда
- Носогубные заломы
- Волюмизация губ
- Контурирование губ


1. Применение согласно инструкции Alexa medium. Рекомендации по введению Alexa medium одобрены медицинскими экспертами компании Institute Hyalual.

■ Alexa MEDIUM

Высокая степень удовлетворенности от проведенных процедур

Валидированная шкала полноты губ (VLFGSV)


Изображение соответствует принятой валидированной шкале Мерц (Merz validated scale)

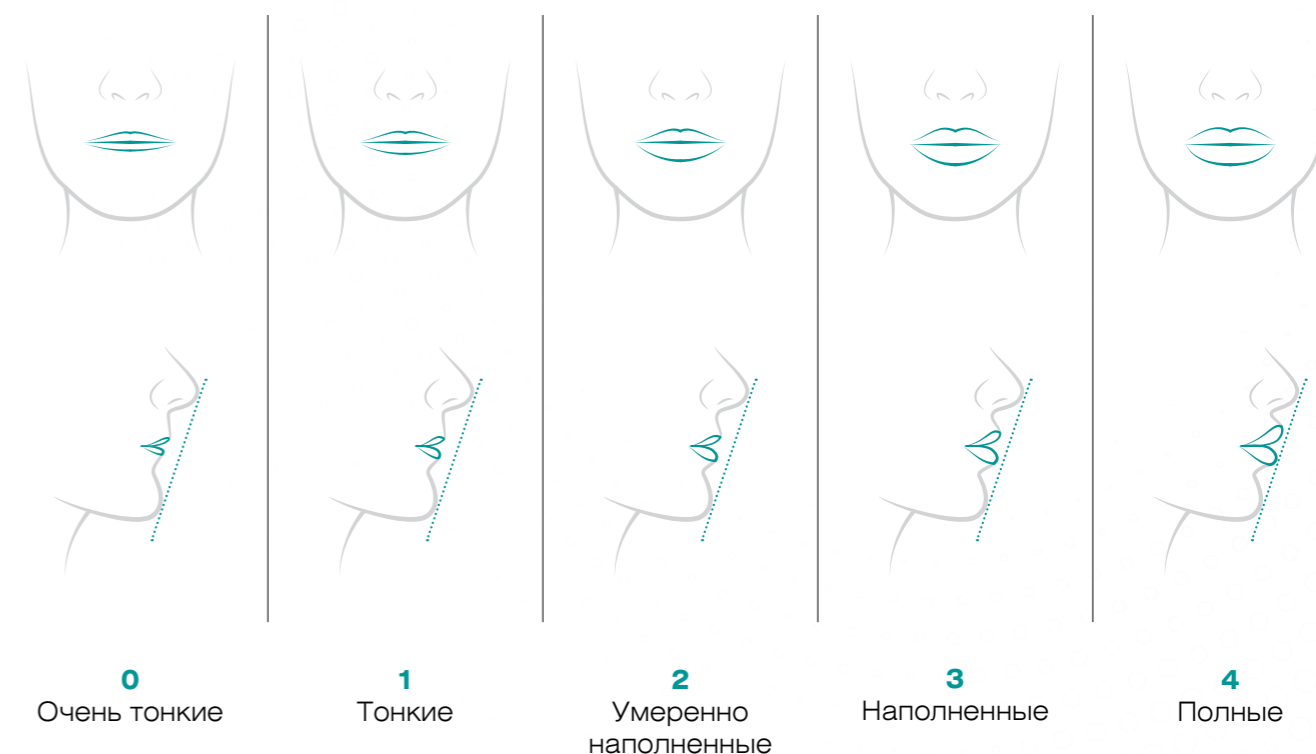


1. Клиническое наблюдение, проведенное в медицинских центрах Institute Hyalual. Данное наблюдение не имеет интервенционного характера. В наблюдении применялся инъекционный имплант Alexa smooth/medium/volume согласно официальной инструкции. Internal data 2017.

■ Alexa MEDIUM


Высокая степень удовлетворенности от проведенных процедур

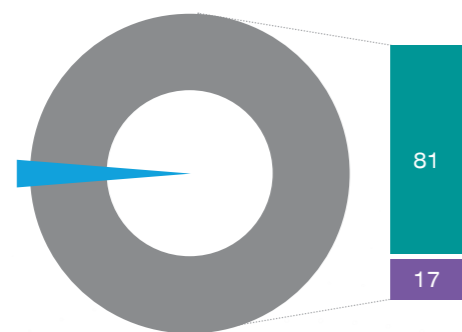

A Оценка VLFGSV после процедуры Alexa medium
N=60

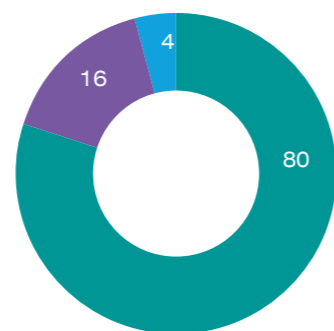

B Оценка VLFGSV спустя 14 дней после процедуры Alexa medium
N=60

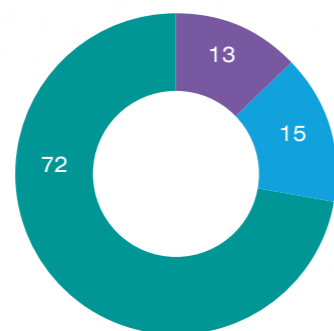

C Оценка VLFGSV спустя 90 дней после процедуры Alexa medium
N=60

■ Очень тонкие ■ Тонкие ■ Умеренно наполненные ■ Наполненные ■ Полные

Рис (a), (b), (c) демонстрируют процент участников наблюдения с сохранившимися результатами коррекции исходно (a), спустя 14 дней (b), спустя 90 дней (c) с применением Alexa medium 17,5 мг/мл

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- 81% пациентов получили достижимую волюмизацию губ «полные губы» 1 мл Alexa medium
- 17% пациентов достигли показателя «максимальная полнота губ»
- 85% у наблюдаемых врачи отметили сохранение результатов спустя 90 дней после процедуры

1. Клиническое наблюдение, проведенное в медицинских центрах Institute Hyalual. Данное наблюдение не имеет интервенционного характера. В наблюдении применялся инъекционный имплант Alexa smooth/medium/volume согласно официальной инструкции. Internal data 2017.


■ Alexa MEDIUM

Доказанная клиническая эффективность



До процедуры

После процедуры спустя 30 дней

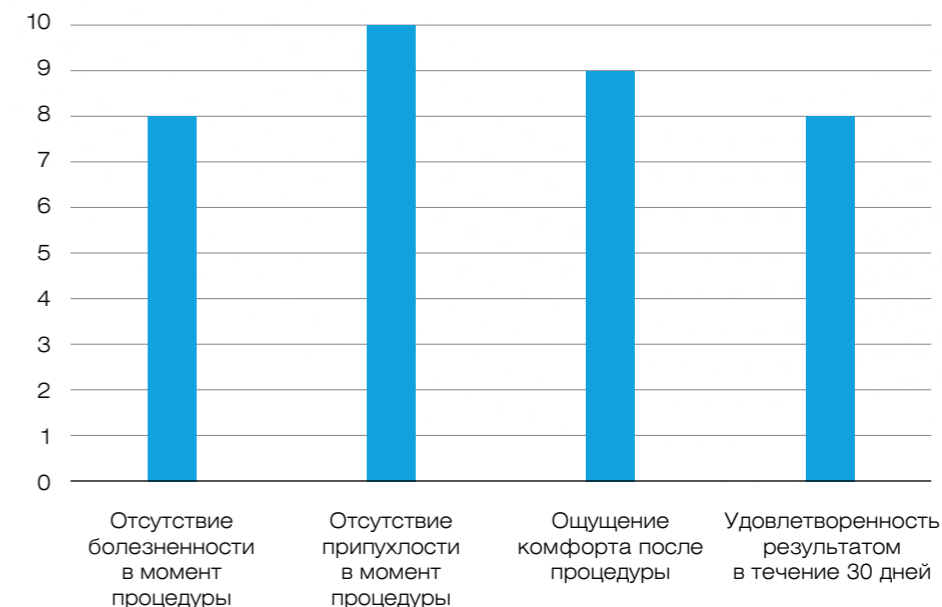

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА INSTITUTE HYALUAL:

Коррекция:

использование Alexa medium. Применялся филлер Alexa medium в объеме 0,6 мл на верхнюю и нижнюю губу

Результаты:

сохранение увеличенного объема губ спустя 30 дней

1. Internal Data 2017. Результаты клинического наблюдения с использованием Vectra software. 2. Данные, полученные из опроса пациентов после проведения коррекции филлером Alexa medium.


■ Alexa MEDIUM

Доказанная клиническая эффективность



До процедуры

После процедуры спустя 60 дней

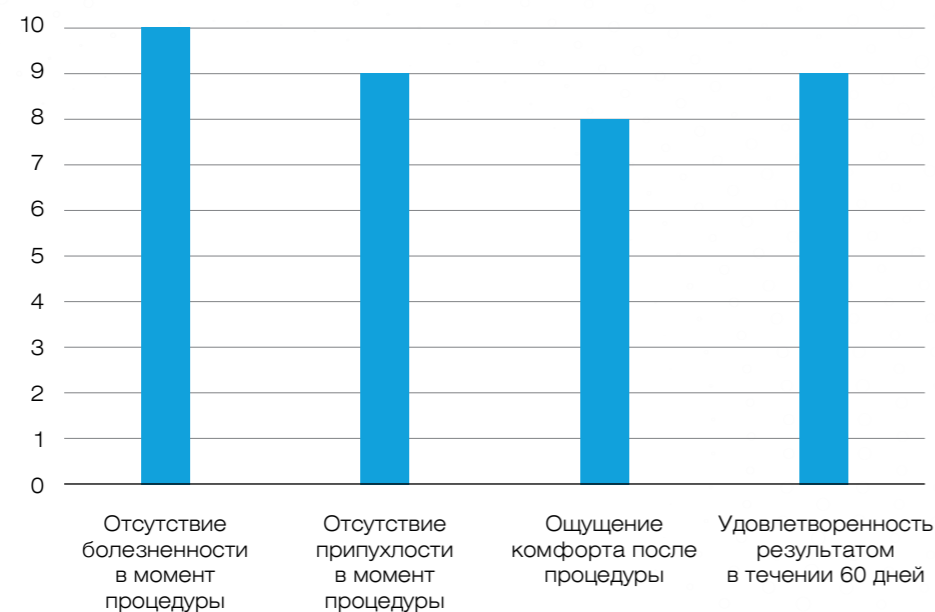

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА INSTITUTE HYALUAL:

Коррекция:

использование Alexa medium. Применялся филлер Alexa medium в объеме 1 мл на верхнюю и нижнюю губу

Результаты:

сохранение увеличенного объема губ спустя 60 дней

1. Internal Data 2017. Результаты клинического наблюдения с использованием Vectra software. 2. Данные, полученные из опроса пациентов после проведения коррекции филлером Alexa medium.


■ Alexa MEDIUM

Доказанная клиническая эффективность



До процедуры

После процедуры спустя 90 дней

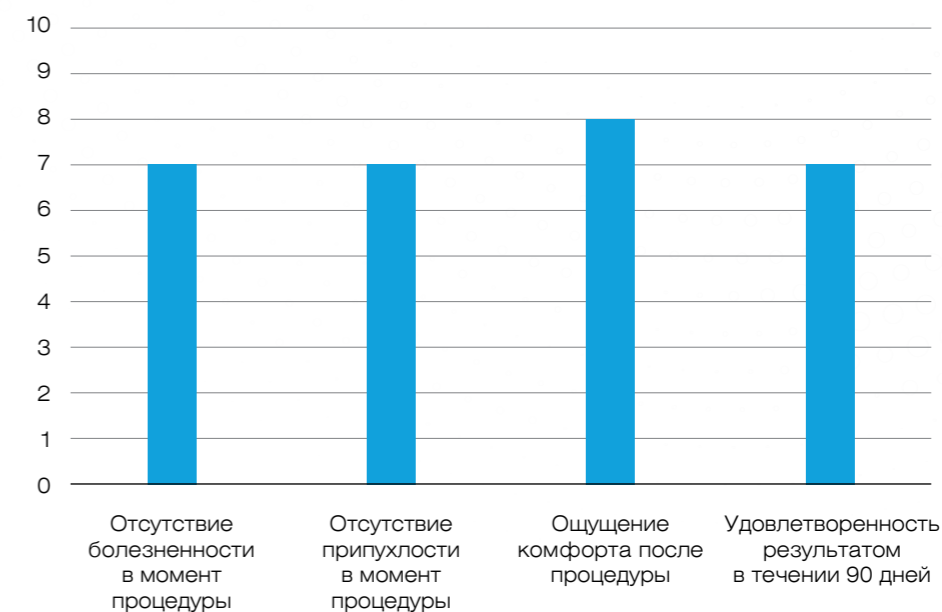

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА INSTITUTE HYALUAL:

Коррекция:

использование Alexa medium. Применялся филлер Alexa medium в объеме 1 мл на верхнюю и нижнюю губу

Результаты:

сохранение увеличенного объема губ на 25% спустя 90 дней

1. Internal Data 2017. Результаты клинического наблюдения с использованием Vectra software. 2. Данные, полученные из опроса пациентов после проведения коррекции филлером Alexa medium.